

■ P C R 検査の提出方法 ■


検査キットに同封されている問診票をご記入ください。

① 手洗いをし、清潔な場所で検査を行います。食後またはうがい後、40分置いてから、検査してください。


② 綿棒を袋から取り出し、写真のように左右の頬の内側を左右10回ほど擦ります。綿棒の先はできるだけ唾液で濡らしてからの方が擦りやすいです。(写真2)

③ 綿棒とセットになった採取容器を袋から取り出します。


※ 採取容器にはウイルスを不活化（感染性をなくす）する液が入っていますのでこぼさないようご注意ください。

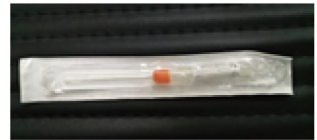

④ 綿棒を袋から取り出し、写真のように左右の頬の内側を左右10回ほど擦ります。綿棒の先はできるだけ唾液で濡らしてからの方が擦りやすいです。

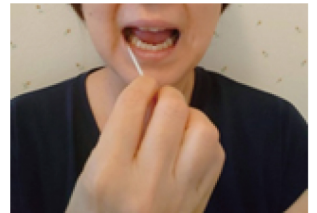

⑤ オレンジの蓋が付いた容器を開け、採取後の綿棒を中の液体とよく混ぜます。混ぜた後は、綿棒はゴミ箱に廃棄してください。

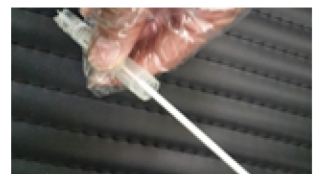

⑥ オレンジ色の蓋をしっかりと閉めて



吸収シートでくるみ付属のビニール袋に入れます。



- ⑦ バイオハザードの袋に入れ、しっかり蓋を閉じます。



- ⑧ 専用の搬送ケース（ UN 3 3 7 3 ラベル ）に入れ
そのまま郵便ポストに投函下さい。



※すぐに配送できない場合は冷蔵庫に保管し（1日以内）翌日配送
してください

箱が開かぬよう、セキュリティーシールを貼り付けてください。

返送の際はご記入いただいた問診票・同意書・誓約書も必ず同封願います。



東北病態研究所