

口腔検査細胞診検査の提出方法

注意事項）

1. 検査キット（採取容器、採取器具、吸収シート、簡易ビニール袋、バイオハザード袋、問診票、返信用封筒）を開封します。
2. 採取容器のラベルに氏名、性別、年齢、採取日を記入してください。
3. 下記の手順に従い、検体を採取してください。
4. 容器の中の薬液は人体には無害ですが、絶対に飲まないでください。
誤って飲んだ場合は多量の水を飲ませた後、指をのどに差し込んで吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けてください。
5. 容器の中の薬液は捨てないようご注意ください。
6. この容器はお渡ししてから早めに採取して同封の返信用封筒にてご返送ください。
7. 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

【口腔検体採取の手順】


① 採取器具を取り出しフタを外して

口腔内の気になる箇所をこすってください。

（気になる箇所がない場合は舌の表面とサイドを重点的にこすってください。）



こすり終わったら採取器具（ブラシを液につける）ごと採取容器に入れてキャップをしっかりと閉めてください。

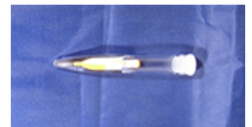

② 吸収シートで包みます。



③ 簡易ビニール袋に入れます。

④ さらにバイオハザード袋に入れて、しっかり閉じます。



返信封筒に入れて問診票と一緒に返送してください。

