

尿細胞診検査の提出方法

注意事項)

1. 検査キット(採取容器、採取器具、吸収シート、簡易ビニール袋、バイオハザード袋、問診票、返信用封筒)を開封します。
2. 採取容器のラベルに氏名、性別、年齢、採取日を記入してください。
3. 下記の手順に従い、検体を採取してください。
4. 容器の中の薬液は人体には無害ですが、絶対に飲まないでください。
誤って飲んだ場合は多量の水を飲ませた後、指をのどに差し込んで吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けてください。
5. 容器の中の薬液は捨てないようにご注意ください。
6. この容器はお渡ししてから早めに採取して同封の返信用封筒にてご返送ください。
7. 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

【尿検体採取の手順】

- ① 同封の折りたたみコップを写真のように自立させ、コップの半分くらいまで尿を入れて10分程度静置します。
(尿中の細胞が下に沈みます。)



- ② 静置後、上澄みはトイレに捨てます。



- ③ 残りの尿を上のような容器に入れます。
この際、赤線(50cc)を超えないように注意して下さい。



- ② 尿を入れた容器を同封の吸収シートで包みます。
- ③ 簡易ビニール袋に入れます。
- ④ さらにバイオハザード袋に入れて、しっかり閉じます。



返信封筒に入れて問診票と一緒に返送してください。

